

## โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

### เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

#### ลิตเติลวัน ถุงอุจจาระปลายเปิดชนิดขึ้นเดียวสำหรับเด็ก

Little Ones One-Piece Drainable Custom-cut Pouch with Stomahesive® Skin Barrier

#### คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ถุงเก็บอุจจาระ ConvaTec Little Ones™ แบบระบายออกได้เป็นถุงขึ้นเดียวที่มีแผ่นป้องกันผิวหนังจากกาวยึดติด ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในเด็ก ถุงนี้มีข้อดีดังต่อไปนี้:


1. มีคุณสมบัติในการปกป้องผิวที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ที่มีแผ่นป้องกันผิวหนัง Stomahesive® แต่ได้รับการปรับให้อ่อนโยนต่อผิว
2. รูเปิดเริ่มต้นสามารถขยายได้เพื่อรองรับเปิดทุกขนาดและรูปร่างที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิ้ว (50 มม.)
3. แผงด้านหลังของกระเป๋ามีลักษณะคล้ายผ้าเพื่อเพิ่มความสบายยิ่งขึ้น
4. มีแผ่นฟิล์มที่นุ่ม กันเสียง และป้องกันกลิ่น
5. มีส่วนปิดกั้นถุงที่นุ่มและปรับรูปได้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำหรับเด็ก

#### ข้อบ่งใช้

ใช้เก็บของเสียจากทวารเทียม


#### วิธีการใช้

##### การเตรียมถุงเก็บ

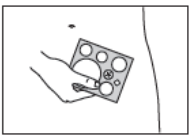


1. วัดขนาดรูทวารเทียมตามแผ่นวัดขนาด

ทำความสะอาดบริเวณนั้นอย่างอ่อนโยนด้วยน้ำและเช็ดโดยทั่วให้แห้ง ผิวบริเวณรอบๆ ทวารเทียมต้องปลอดจากตัวทำลายหรือสารที่สิ้น

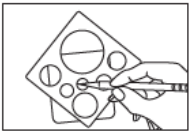

2. ลากเส้นวัดขนาดของรูเปิดลงบนแผ่นรองสีขาว โดยวางที่ตรงกลางรอบๆ รูเปิดเริ่มต้น

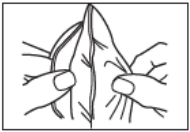


3. สิ่งสำคัญ: ก่อนตัด ให้แยกแผงด้านหน้าและด้านหลังออกเพื่อไม่ให้ตัดโดนแผงด้านหน้าของถุงอุจจาระ



4. ใช้กรรไกรขาโค้งตัดขยายรูตรงกลางให้ใหญ่กว่ารอยที่ลากเส้นไว้เล็กน้อย  
อย่าตัดเลยขอบวงกลมบนกระดาดาชุ่ม


##### วิธีการใช้คลิปปิดปลายถุง

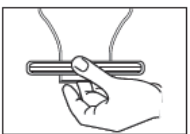


สิ่งสำคัญ: (a) การติดส่วนปิดกั้นถุงตามวิธีที่อธิบายไว้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการรั่วไหล

(b) ติดส่วนปิดกั้นถุงก่อนที่จะติดถุงเก็บปัสสาวะเข้ากับร่างกาย

5. นำกระดาดาชุ่มออกจากแถบกาวที่อยู่บนส่วนปิดกั้นถุง วางตำแหน่งปิดประมาณ 1/4 นิ้วจากปลายส่วนปิดกั้นถุง โดยติดลงที่ทางด้านข้างของถุงด้านที่ไม่มีแผ่นป้องกันผิวหนังแล้วกดให้เข้าที่

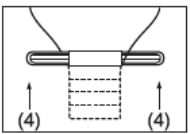

6. พับก้นถุงขึ้น 4 ครั้งให้แน่นตามรูป

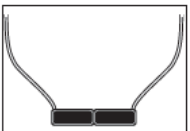


7. พับส่วนปิดกั้นถุงให้แน่นตามรูปไปทางด้านข้างของถุงด้านที่ไม่มีแผ่นป้องกันผิวหนัง โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้นถุงเรียบแบนและไม่เป็นรอยย่น

## วิธีการติดถุงเก็บ




สิ่งสำคัญ: ควรใช้ความระมัดระวังในการออกแรงโดยใช้แรงกดเบาๆ เท่านั้นที่บริเวณหน้าท้องของเด็กทารกเมื่อมีการใช้ระบบถุงได้ก็ตาม

8. นำกระดาดหุ้มออกจากแผ่นป้องกันผิวหนังโดยให้นิ้วสัมผัสกับแถบกาวให้น้อยที่สุด หมายเหตุ: เมื่อใช้กาว Stomahesive 8 ขอแนะนำให้ใช้ทำเป็นวงแหวนรอบรูที่ขยายไว้ที่ด้านกาวของแผ่นป้องกันผิวหนัง

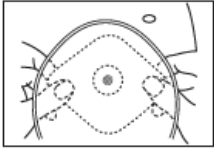


9. จับด้านข้างของแผ่นป้องกันผิวหนังทั้งสองข้างและวางให้ตรงตำแหน่งของรูที่ขยายไว้บริเวณเหนือปากทวารเทียม

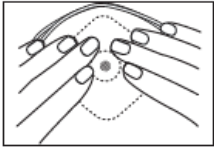

10. กดแผ่นป้องกันผิวหนังเบาๆ โดยให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในบริเวณที่ใกล้กับปากทวารเทียมมากที่สุด สามารถใส่ถุงได้นานเท่าที่ยังรู้สึกสบายและไม่มีอาการระคายเคือง

## วิธีการดึงถุงอุจจาระออก

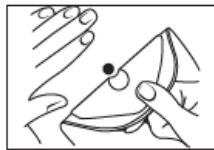

11. การดึงออกสามารถทำได้โดยดึงจากด้านบนสุดจนถึงล่างสุด โดยค่อยๆ ดึงแผ่นป้องกันผิวหนังออกจากผิวหนังพร้อมใช้มืออีกข้างหนึ่งกดเบาๆ บนผิวหนังที่อยู่ติดกัน ไม่จำเป็นต้องขจัดสิ่งตกค้างทั้งหมดออก

## การกำจัดทิ้ง

ปฏิบัติตามข้อกำหนด/ข้อบังคับในการกำจัดทิ้งในแต่ละประเทศ

### คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีการเพาะปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมีคราบขาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผู้ป่วยเหล่านี้บ้าง ครั้ง หากตรวจพบก้อนในระบบทางเดินปัสสาวะ ให้ประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเริ่มให้การรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม
- หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยุดใช้และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์

## วิธีการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส เก็บรักษาในที่แห้ง

### ปริมาณบรรจุ

1 กล่องบรรจุ 15 ชิ้น และคลิปปิดปลายถุงจำนวน 15 ชิ้น

### คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



หมายถึง รุ่นการผลิต

EXP. DATE หมายถึง วันหมดอายุ

### เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

### ผลิตโดย

บริษัท คอนวาเทค โดมินิกัน รีพับลิค อิงค์, ซาน คริสโตบาล, สาธารณรัฐโดมินิกัน

### นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร. 02-6147000