

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

สโตมาฮีซีฟเพสต์ ครีมปกป้องผิวหนังและเคลือบร่องผิว

Stomahesive® Paste

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

Stomahesive® Paste เป็นครีมปกป้องผิวหนัง เคลือบร่องหลุม สร้างเกราะป้องกันที่ใช้งานสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงออกแบบมาสำหรับใช้รอบบริเวณรูทวารเทียมหรือรูเปิดสภาวะเทียมโดยเฉพาะ ครีมนี้ยังสามารถใช้เพื่อป้องกันผิวหนังที่สัมผัสกับบริเวณรูเจาะระหว่างฐานของรูเปิดทวารเทียมและช่องเปิดของแบ็น และทำหน้าที่เติมเต็มร่องรอยพับของผิวหนัง หรือบริเวณผิวหนังที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบสม่ำเสมอ และรอยแผลเป็น

ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับช่วยติดแบ็นให้แน่นขึ้น และช่วยเติมเต็มร่องบริเวณหน้าท้องให้เหมาะกับการติดแบ็น

วิธีการใช้

การใช้ทาลงบนแบ็น

- เตรียมแบ็นตามที่อธิบายไว้ในคำแนะนำในการใช้งานที่มาพร้อมกับแบ็น
- ทาครีมเป็นวงรอบๆ ด้านหลังแบ็นบริเวณรอบรูหลุม อย่าเกลี่ยครีม รอบประมาณ 1 นาทีก่อนแปะแบ็น
- เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้บีบจากกันหลุดและรีดหลุดให้เรียบขึ้นด้านบน

การใช้ทาลงบนผิวหนัง

- ทาครีม Stomahesive® เพื่อเติมเต็มร่องผิวและพื้นผิวที่ไม่เรียบให้สม่ำเสมอ หากจำเป็น ให้ใช้นิ้วหรือที่ทาครีมชุบน้ำให้ชุ่มขึ้นแล้วเกลี่ยให้ทั่ว (1)

คำแนะนำโดยทั่วไป

- แปะแบ็นและกดลงรอบๆ ฐานของช่องรูเปิด (2)
- อาจทาครีมเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเพื่อปกป้องผิวหนังบริเวณรอบช่องรูเปิด
- ปิดฝาให้แน่น

การเช็ดทำความสะอาดครีม STOMAHESIVE® PASTE

ครีม Stomahesive® Paste สามารถเช็ดทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายหลังจากทิ้งไว้เป็นเวลา 48 ชั่วโมง

หากจำเป็นต้องเช็ดครีมออกก่อน สามารถใช้น้ำอุ่นเช็ดออกได้ ไม่จำเป็นต้องเช็ดรอยครีมทั้งหมดออกก่อนที่จะทาครีมใหม่

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ครีมหรือส่วนผสมที่อยู่ในครีมนี้
- สิ่งสำคัญ:
 - สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น ห้ามใช้ทาแผลเปิดหรือแผลเรื้อรังที่ผิวหนัง
 - มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์
 - หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยุดใช้และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์

วิธีการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส เก็บรักษาในที่แห้ง

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 183910 ใน 1 กล่องบรรจุ 1 หลอด (56.7 กรัม)

©2019 ConvaTec Inc.

®/™ แสดงถึงเครื่องหมายการค้าของ ConvaTec Inc.

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



คำเตือน



เก็บที่อุณหภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส



หมายเลขแคตตาล็อก



อ่านเอกสารกำกับก่อนการใช้งาน หรือ เอกสารกำกับอิเล็กทรอนิกส์



ผู้ผลิต



รุ่นการผลิต



วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท คอนวาเทค โดมินิกัน รีพับลิค อิงค์, ซาน คริสโตบาล, สาธารณรัฐโดมินิกัน

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000